

bite-perf

INSTRUCTIONS

DOKONALÁ OKLUZE A ESTETIKA KOMPOZITNÍCH VÝPLNÍ

Návod k použití:



1. Otisk okluzální plochy před zákrokem.



2. Otiskovací hmotu nejprve zahříváme nad plamenem po dobu asi 20 sekund dokud se nezačne lesknout. Pomůcka ; v žádném případě nesmí přijít do styku s plamenem. Po změknutí je připravena k použití.



3. Tlakem aplikujeme lesklou otiskovací hmotu na mokrou okluzální plochu a opět ochlazujeme vodou po dobu asi 20 sekund. Odstraníme pomůcku a ponecháme na místě, kde nebude pod přímým slunečním a tepelným zářením.



4. Standardně odstraňujeme kaz. Po dokončeném vyleptání aplikujeme pojivo dle návodu výrobce, osvěčujeme a vrstvíme kompozita. Ponecháme asi dva mm na poslední vrstvu, kterou neosvěčujeme.



5. Za pomoci malého kartáčku aplikujeme tenkou vrstvu tekutého separátoru, např. vazelíny.



6. Na tuto poslední vrstvu aplikujeme otiskovací pomůcku, vizuálně zkontrolujeme, zda sedí a pevně přitiskneme na okluzální plochu zubu.



7. Odstraníme pomůcku. Původní okluzální tvar je zachován. Sondou odstraníme zbytky nepolymerovaného kompozita.



8. Znovu pevně přitiskneme pomůcku na poslední vrstvu kompozita, zkontrolujeme, zda sedí a osvěčujeme o dobu 20 sekund. Světlo bude směřovat na volnou stranu pomůcky.



9. Odstraníme pomůcku a pokračujeme v osvěcování dle návodu výrobce. V některých případech je nutné plochu doleštit.



bite-perf

DIRECT OCCLUSAL
DUPLICATING DEVICE

Univerzální pomůcka rychle zajistí dokonalou kompozitní výplň, původní anatomii a estetiku.

BALENÍ VÝROBKU

Běžné balení obsahuje
40 nesterilních otiskovacích pomůcek.



* V každém souboru je návod k použití a ilustrace



BITE-PERF Productos Dentales S. L.

C/ Lope de Rueda, 55
29190-MÁLAGA
SPAIN

Tel. + 34 952 432 649
E-mail: biteperf@hotmail.com
biteperf.es



bite-perf

DIRECT OCCLUSAL
DUPLICATING DEVICE



The Art of Duplication

BITEPERF
Dental Products

bite-perf

DIRECT OCCLUSAL
DUPLICATING DEVICE

Hlava je přesná

Do kulaté hlavy je vložena otiskovací hmota.

- Přesný otisk okluzální plochy během minuty.
- Světlo lampy snadno projde hlavou.
- Jedna velikost na všechny moláry.

Univerzální krk

Umožňuje přístup na veškerá místa v ústech.

- Krk z flexibilního materiálu umožňuje pomůcku ohnout a zjednodušit tak otiskování.

Pevné držadlo

Zaručí bezpečnou manipulaci při otiskování okluzálního prostoru.

- Uživatelsky přátelské držadlo neklouže a usnadňuje manipulaci.
- Nápis zaručí rychlou identifikaci.
- Bezpečnostní otvor na nit pomůže pomůcku vytáhnout.

bite-perf

DIRECT OCCLUSAL
DUPLICATING DEVICE

Inovativní pomůcka na kompozitní výplně. Žádné zdlouhavé dokončování a leštění.



Problém: Nákladná doba na křesle nutná na dokončování a leštění kompozitní výplně.



Větší potřeba kompozita, které se neosvítí.



Dosáhneme sice vhodný barevný odstín, nikoliv však přesně obnovit okluzální povrch.



Obnova anatomie a úprava nežádoucích okluzálních kontaktů ke náročná.



Nadbytek kompozita je nutný s cílem obnovy anatomie, úprav a leštění.

bite-perf

DIRECT OCCLUSAL
DUPLICATING DEVICE

Bite-perf zaručuje rozumné provedení výplně – omezí nadbytek kompozita, zkrátí dobu na obnovu anatomie, dokončování a leštění.



Řešení: Na poslední vrstvu kompozita přitiskneme Bite-perf.



Bite-perf zvýší tvrdost výplně tím, že nepropustí vzduch na začátku osvětlování.



Obnoví původní anatomii a zkrátí dobu na křesle.



Jen výjimečně jsou zapotřebí drobné úpravy.



Bite-perf zaručuje rozumné provedení výplně. Omezí nadbytek kompozita a dobu na úpravy, dokončování a leštění